

Opción de cortado: Se debe retirar el catéter antes de usar este método.




PASO CUATRO

- USE unas tijeras de punta roma para cortar completamente la base por la mitad a lo largo de la ranura azul, mientras sujeta firmemente las ala.
- La torsión puede causar molestias, por eso es importante hacer un corte firme y con confianza



PASO CINCO


- Presione con firmeza en el punto de inserción con una mano
- Las patas flexibles de sujeción tienen forma de "L" y alcanzan una extensión de 5 mm a cada lado del punto de acceso

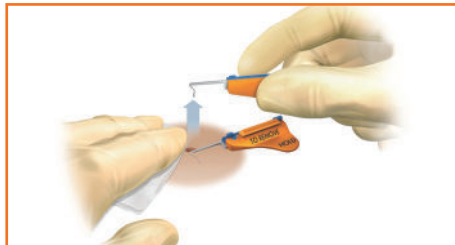

PASO SEIS

- Gire el borde azul hacia arriba y realice un movimiento ascendente rápido y deliberado, para retirar cada pata por separado siguiendo su propia forma, mientras mantiene la tracción de la piel cerca del punto de inserción

Apoyo clínico las 24 horas de SecurAcath:
800-225-0000

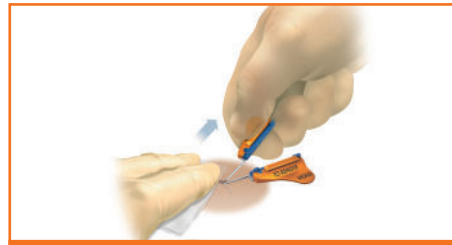

OPCIONAL

- Si se encuentra con una resistencia excesiva, presione con firmeza sobre la pata con un dedo en el punto de inserción.
- Jale la pata contra la presión de su dedo para enderezar la pata flexible al superar la resistencia.
- La pata de nitinol está diseñada para flexionarse fuera del punto sin dañar el tejido

Colocado por: _____

Paciente: _____

Fecha de nacimiento/ID: _____

Fecha de colocación: _____

N.º de lote: _____

Longitud total del catéter:(cm) _____

Longitud externa:(cm) _____

Puede encontrar toda la información y las instrucciones completas de uso en www.securacath.com





©2022 por Interrad Medical, Inc. Todos los derechos reservados
1329-034 Rev F



Descargue
la aplicación
SecurAcath



Información al paciente y guía para el cuidado y mantenimiento

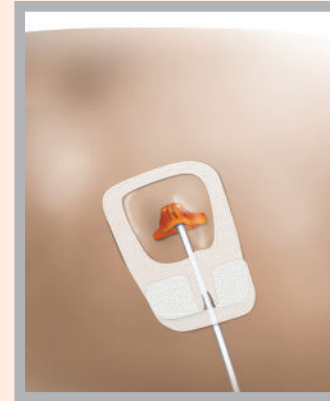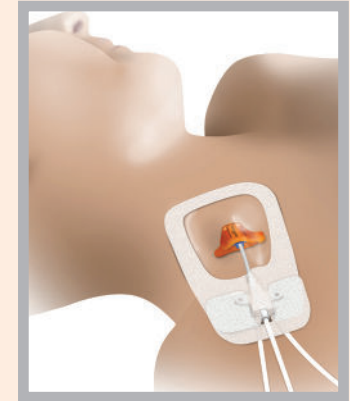

securAcath.

For the Life of the Line




Su catéter queda asegurado con el dispositivo de sujeción subcutánea SecurAcath®.

Acerca del dispositivo SecurAcath:

- El dispositivo SecurAcath cuenta con patas de sujeción pequeñas, flexibles y sin filo que van por debajo de la piel y que estabilizan el catéter justo en el punto de entrada al organismo.
- El dispositivo SecurAcath está diseñado para asegurar el catéter durante toda la terapia, eliminar el movimiento o el desplazamiento del catéter y evitar la interrupción del tratamiento.
- Usted puede someterse a una resonancia magnética con el dispositivo SecurAcath colocado.
- No es necesario cambiar el dispositivo SecurAcath. Puede considerarse como una parte más del catéter.
- El dispositivo SecurAcath se retirará junto con el catéter.

Cuidado y mantenimiento:

- Cumpla con los protocolos de su prescriptor previstos para el cuidado del punto de ubicación del catéter.
- Su proveedor de atención médica debe estar informado sobre el SecurAcath antes de realizar un cambio de apósito.

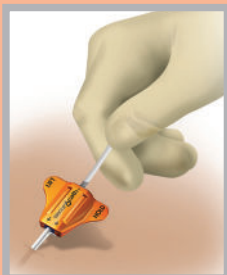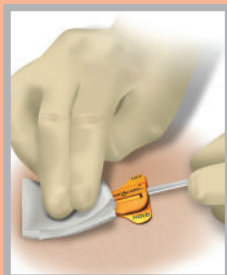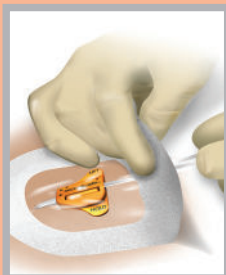

Retire el apósito siguiendo el protocolo del hospital; use un eliminador de adhesivo si fuera necesario. No retire la cubierta del SecurAcath durante los cambios de apósito.

Si hay supuración o sangre en el lugar de ubicación o en el SecurAcath, use una gasa empapada en solución salina para limpiar y retirar cualquier vestigio, y asegúrese de que el dispositivo esté visiblemente limpio y seco.

Levante suavemente el catéter y el SecurAcath, como si fuera una bisagra, para limpiar alrededor del punto de inserción del catéter. No tuerza ni gire el SecurAcath de su orientación original.

Mientras lo mantiene levantado, use un agente antiséptico para limpiar los 360 grados alrededor del lugar de ubicación, el catéter y el SecurAcath. Deje que la piel se seque por completo.

- Coloque el apósito transparente semipermeable sin ejercer mucha presión. Si el apósito se coloca demasiado ajustado, puede provocar molestias.
- El apósito transparente debe cubrir el sitio de inserción, el SecurAcath y las alas de sutura del catéter. Solo los tubos de extensión deben quedar fuera del apósito para evitar tirones o dobleces en el catéter.
- Si hay algún dolor en el punto de inserción, intente cambiar el apósito. Asegúrese de que el SecurAcath quede plano sobre la piel y que no se haya desplazado de su posición original. Reemplace el apósito transparente, asegurándose de que no quede demasiado ajustado.
- Si el catéter o el SecurAcath se movieron de la posición original, comuníquese con su proveedor de atención médica.

Extracción: La debe realizar un proveedor de atención médica capacitado.



Escanee para ver los videos



PASO UNO

- Levante el SecurAcath del paciente
- Sostenga la lengüeta de sujeción (HOLD) con el pulgar y otro dedo de una mano para estabilizar las aletas del SecurAcath



PASO DOS

- Levante el borde de la lengüeta de elevación (LIFT) con la otra mano para liberar la cubierta de la base (Como abrir una lata de soda)
- Evite girar la base mientras retira la cubierta. Un movimiento de giro mueve las patas debajo de la piel y es molesto para el paciente



PASO TRES

- Retire el catéter - no use fuerza excesiva.
- Mantenga presión en el lugar para lograr la hemostasia.

Opción de plegado: Se puede utilizar con o sin el catéter colocado en su lugar



PASO CUATRO

- Presione con firmeza en el punto de inserción para mantener inmóvil el tejido.
- Pliegue las aletas hacia abajo para unir las patas debajo de la piel

SUGERENCIAS ÚTILES

- Use una gasa empapada en solución salina si el punto de inserción está rígido o si hay una costra.
- Puede usar un analgésico para adormecer el punto de inserción y eliminar las molestias durante la extracción de la fijación si el paciente es muy sensible al dolor.
- Presione con firmeza en el punto a fin de mantener el tejido inmóvil para una mejor extracción.
- Retire las patas con un movimiento seguro siguiendo la forma de la pata.
- Se pueden reducir o eliminar las molestias del paciente si se retiran rápidamente las patas de SecurAcath, sin girar ni dudar



PASO CINCO

- Sujete la base plegada y manténgala horizontal a la piel.
- Realice un movimiento ascendente rápido y deliberado para retirarlo, siguiendo la forma de las patas.

↓ En el reverso continua la Información para la Opción de cortado ↓