

分离方式： 使用本方法前必须先拔除导管。



步骤四

- 握住双翼保持不动，同时用钝头剪刀沿凹槽纵向将底座完全剪成两半。
- 底座扭动会引起不适感，因此剪除底座时应保持坚定平稳。



步骤五

- 单手紧按插入部分。
- 柔性固定脚呈“L”形，向插入部位两侧各延长5毫米。



步骤六

- 保持插入部位附近皮肤的牵引力，同时向上转动蓝色边缘，根据固定脚形状，小心迅速地往上分别拔除每只固定脚。



可选

- 如果遇到过大阻力，请用一根手指在插入部位紧握固定脚。
- 拉起固定脚时遇到阻力，可抵住手指压力拉起，使柔性固定脚保持直立。
- 镍钛诺固定脚专为插入部位设计，可轻松拔除，不会伤害身体组织。

SecurAcath全天24小时临床支持
800-225-0000

安装人: _____

患者: _____

出生日期/身份证号: _____

安装日期: _____

批号: _____

导管总长(厘米): _____

外长(厘米): _____

如需了解完整信息与使用说明，请访问 www.securacath.com







© 2022 by Interrad Medical, Inc. 版权所有
1329-034 Rev F



下载
SecurAcath®
应用程序



患者信息与护理保养指南

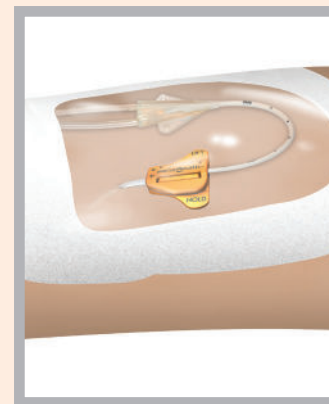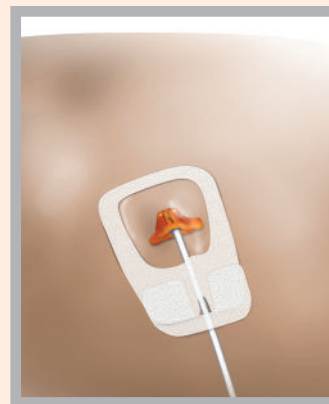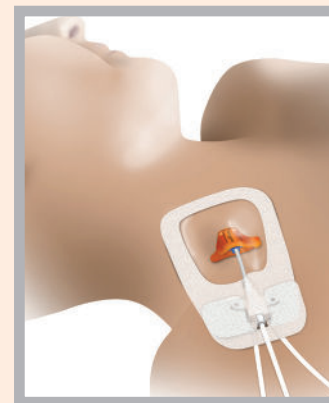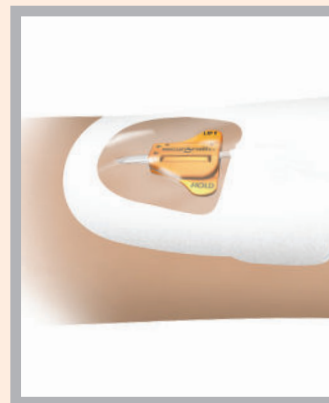

securAcath.

For the Life of the Line


选择SecurAcath®皮下固定装置固定导管。

SecurAcath装置介绍：

- SecurAcath配备一对小型固定脚，柔韧且不锋利，可将导管正好固定在插入体内时的位置。
- SecurAcath专为治疗期间固定导管而设计，可防止导管移动或移位，避免治疗中断。
- 固定导管后不会影响磁共振检查。
- SecurAcath无需更换。SecurAcath可视为导管的一部分。
- 导管移除后，SecurAcath也会被移除。

护理与保养：

- 遵循处方医师关于导管部位护理的医疗方案。
- 护理员更换敷料前，应对SecurAcath有所了解。

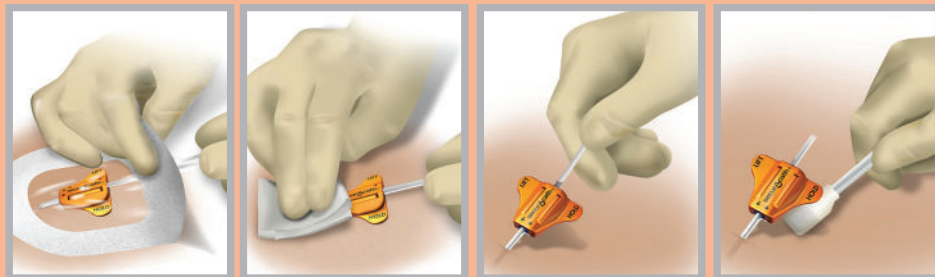

按医院医疗方案揭除敷料，必要时可使用粘胶去除剂。更换敷料时请勿取下SecurAcath盖子。

如果插入部位或SecurAcath出现渗液或血渍，请使用生理盐水浸泡过的纱布清除干净，并确保装置清洁干燥。

轻轻抬起导管和SecurAcath，呈现出铰链形状，然后清洁导管插入部位的周围皮肤。请勿扭动或转动SecurAcath，以免偏离原方向。

导管和SecurAcath仍然处于抬起状态时，请使用消毒剂对插入部位、导管和SecurAcath周围进行360度清洁。使皮肤完全干燥。

- 贴半透性透明敷料时，不要贴得太紧。如果敷料贴得太紧，可能会引起不适。
- 透明敷料应当盖住插入部位、SecurAcath和导管缝合翼。仅保持延长管位于敷料外，以防导管拉动或扭结。
- 如果插入部位出现任何疼痛，请尝试更换敷料。确保SecurAcath平放于皮肤上，而且未偏离原方向。更换透明敷料，确保敷料不要贴得太紧。
- 如果导管或SecurAcath已偏离原位置，请联系医疗护理员。

移除：由受过培训的医疗护理员操作



扫码看视频



步骤一

- 将SecurAcath从患者身上抬起。
- 用单手拇指和手指紧握固定舌，使SecurAcath双翼保持固定状态。



步骤二

- 单手向上撬动提拉舌，使盖子从底部松开（就像打开易拉罐）
- 移除盖子时避免扭动底座。底座扭动会导致固定脚在皮下移位，进而使患者感到不适



步骤三

- 移除导管——请勿用力过大。
- 按压插入部位止血

折叠方式：有无导管都可使用



步骤四

- 紧按插入部位，使身体组织保持不动。
- 朝下折叠双翼，使固定脚合拢于皮下。

温馨提示

- 如果插入部位发硬或结痂，请使用生理盐水浸泡过的纱布。
- 如果患者对疼痛高度敏感，可使用镇痛剂麻醉插入部位，以便在拔出固定器时消除不适感。
- 紧按插入部分，使患处保持不动，以便移除时更方便。
- 取出固定脚时，目标要明确——按照固定脚形状操作。
- 移除SecurAcath固定脚时，动作要快，不要扭动或犹豫，这样可降低或消除患者的不适感。



步骤五

- 握住已折叠的底座，与皮肤保持水平方向。
- 根据固定脚形状，小心迅速地往上拔除

↓ 继续阅读背面的“分离方式”内容 ↓